
Monurelle®

CBD Oleogel

Monurelle® CBD Oleogel è un dispositivo medico a base di Cannabidiolo (CBD) e Mircene per il trattamento di supporto delle sindromi genitourinarie femminili, inclusi stati di disagio vulvovaginale, irritazioni, secchezza, atrofia, bruciore e delle condizioni associate a vulvodinia.

Confezione

Monurelle® CBD Oleogel è in commercio in confezione con tubo airless da 30 ml.

Il confezionamento airless è progettato per proteggere il prodotto dall'aria e dalle contaminazioni, preservandone l'integrità. La tecnologia airless garantisce un dosaggio del prodotto controllato e aiuta a ridurre gli sprechi.

Le prime erogazioni possono non rilasciare il prodotto, ciò è dovuto alla fase di innesco del sistema airless.

Nella linea Monurelle® CBD è presente anche il prodotto Monurelle® CBD Ovuli.

Come agisce

Grazie alla sua elevata capacità bioadesiva, il prodotto forma un film protettivo che aderisce ai tessuti, contribuendo a migliorare e sostenere il trofismo genitourinario. In questo modo Monurelle® CBD Oleogel favorisce la ricompattazione degli strati epiteliali e connettivi e riduce progressivamente il disturbo percepito, migliorando il comfort locale.

L'applicazione del prodotto, contenente Cannabidiolo (CBD) e Mircene, crea una barriera che limita il contatto con agenti esterni potenzialmente irritanti, contribuendo a ridurre la sensibilità locale. Allo stesso tempo, i componenti lipidici favoriscono l'idratazione della mucosa, aiutando a mantenere l'elasticità dei tessuti e prevenendo la secchezza. Il trattamento con Monurelle® CBD Oleogel favorisce un ambiente protetto e idratato, la riduzione delle irritazioni e dei fastidi percepiti e sostiene il benessere intimo femminile.

Applicazione

1 erogazione 1-2 volte al giorno (es. mattina e sera) a livello vulvovaginale.

Modalità d'uso

1. Aprire la confezione
2. Lavarsi le mani prima dell'applicazione e provvedere ad un'adeguata igiene intima
3. Premere sull'erogatore e applicare delicatamente il prodotto con le dita a livello vulvovaginale. Non introdurre il tubo in vagina
4. Richiudere la confezione dopo l'uso

Ingredienti

Olio di mandorle dolci, Trigliceride caprilico/caprico (MCT), Cannabidiolo (CBD 5%), Silice dimetil sililato, Mircene, Olio essenziale di citronella, Olio essenziale di *Cananga odorata*.

Effetti indesiderati

Non sono noti effetti indesiderati derivanti dall'uso di Monurelle® CBD Oleogel.

Avvertenze e precauzioni d'uso

Il prodotto è destinato alle donne in età fertile, menopausa e post menopausa, esclusivamente per un uso individuale e non deve essere condiviso.

Il prodotto non è stato valutato durante la gravidanza e l'allattamento. Se si è in gravidanza o si sta allattando, consultare il medico prima dell'uso.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti
- Non applicare su mucosa lesa
- In caso del permanere del disagio o in caso di effetti collaterali indesiderati, consultare il medico
- Segnalare tempestivamente al fabbricante e al Ministero della Salute (Lungotevere Ripa, 1 - 00144 Roma (RM)) eventuali eventi avversi gravi associati all'uso di questo dispositivo medico
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione
- Non ingerire
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi: risciacquare abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare il medico

Se non si osservano miglioramenti entro 30 giorni o in caso di peggioramento dei sintomi, è sempre consigliabile consultare il proprio medico.

In caso di eventuali eventi avversi Monurelle® CBD Oleogel può essere facilmente rimosso con normali procedure di igiene intima.

Possibili interazioni

Attualmente non sono note interazioni tra il prodotto e farmaci o altri dispositivi medici. Tuttavia, in caso di uso concomitante, continuativo e prolungato di farmaci, in particolare anticoagulanti, antiaggreganti o medicinali sedativi, si consiglia di consultare il medico prima dell'applicazione del prodotto.

Modalità di conservazione

Conservare in un luogo asciutto e a temperatura ambiente tra i 5°C e 25°C.

Lotto e scadenza

Lotto e scadenza sono riportati sul fondo del tubo e sul fondo della confezione esterna.



Agorà Pharma Srl
Piazza Duomo, 20
20122 Milano - Italia

Distribuito da Zambon Italia Srl
Via Lillo del Duca, 10
20091 Bresso, Milano - Italia

CARTA	PLASTICA	INDIFFERENZIATA
ASTUCCIO (PAP 21) FOGLIETTO (PAP 22)	CAPSULA (PP 5)	TUBO + POMPA (C/PP 90)
RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica le disposizioni del tuo comune		

MD

REF MM001



Zambon