
Monurelle®

CBD Ovuli

Monurelle® CBD Ovuli è un dispositivo medico a base di Cannabidiolo (CBD) e Mircene per il trattamento di supporto delle sindromi genitourinarie femminili, inclusi stati di disagio vulvovaginale, irritazioni, secchezza, atrofia, bruciore e delle condizioni associate a vulvodinia.

Confezione

Monurelle® CBD Ovuli è in commercio in confezione da 10 ovuli.

Nella linea Monurelle® CBD è presente anche il prodotto Monurelle® CBD Oleogel.

Come agisce

Grazie alla sua elevata capacità bioadesiva, il prodotto forma un film protettivo che aderisce ai tessuti, contribuendo a migliorare e sostenere il trofismo genitourinario. In questo modo Monurelle® CBD Ovuli favorisce la ricompattazione degli strati epiteliali e connettivi e riduce progressivamente il disturbo percepito, migliorando il comfort locale.

L'applicazione del prodotto, contenente Cannabidiolo (CBD) e Mircene, crea una barriera che limita il contatto con agenti esterni potenzialmente irritanti, contribuendo a ridurre la sensibilità locale. Allo stesso tempo, i componenti lipidici favoriscono l'idratazione della mucosa, aiutando a mantenere l'elasticità dei tessuti e prevenendo la secchezza. Il trattamento con Monurelle® CBD Ovuli favorisce un ambiente protetto e idratato, la riduzione delle irritazioni e dei fastidi percepiti e sostiene il benessere intimo femminile.

Applicazione

1 ovulo al giorno, preferibilmente la sera prima di coricarsi, o secondo indicazione medica.

Modalità d'uso

1. Lavarsi le mani accuratamente e provvedere ad un'adeguata igiene intima
2. Separare un singolo ovulo dal blister tirando lungo la linea di frattura
3. Afferrare le due alette di plastica e tirarle delicatamente, senza aprire completamente l'involucro
4. Estrarre delicatamente l'ovulo dall'involucro
5. Tenere l'ovulo con la punta delle dita, per prepararsi all'inserimento in vagina
6. Preferibilmente in posizione supina, inserire delicatamente l'ovulo in vagina cercando di arrivare quanto più possibile in profondità. Si consiglia di rimanere in posizione supina, per ottimizzare l'azione del prodotto ed evitare fuoriuscite accidentali

Ingredienti

Gliceridi, C10-18 (Gliceridi, C12-18), Cannabidiolo (CBD 5%), Mircene.

Effetti indesiderati

Non sono noti effetti indesiderati derivanti dall'uso di Monurelle® CBD Ovuli.

Avvertenze e precauzioni d'uso

Il prodotto è destinato alle donne in età fertile, menopausa e post menopausa, esclusivamente per un uso individuale e non deve essere condiviso.

Il prodotto non è stato valutato durante la gravidanza e l'allattamento. Se si è in gravidanza o si sta allattando, consultare il medico prima dell'uso.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti
- Non usare su mucosa lesa
- In caso del permanere del disagio o in caso di effetti collaterali indesiderati, consultare il medico
- Segnalare tempestivamente al fabbricante e al Ministero della Salute (Lungotevere Ripa, 1 - 00144 Roma (RM)) eventuali eventi avversi gravi associati all'uso di questo dispositivo medico
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione
- Non ingerire
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi: risciacquare abbondantemente con acqua e, se necessario, consultare il medico
- Dopo l'applicazione possono essere presenti residui biancastri e inodori, attribuibili alla composizione del prodotto. Tale evenienza non altera l'efficacia del trattamento

Se non si osservano miglioramenti entro 30 giorni o in caso di peggioramento dei sintomi, è sempre consigliabile consultare il proprio medico.

Possibili interazioni

Attualmente non sono note interazioni tra il prodotto e farmaci o altri dispositivi medici.

Tuttavia, in caso di uso concomitante, continuativo e prolungato di farmaci, in particolare anticoagulanti, antiaggreganti o medicinali sedativi, si consiglia di consultare il medico prima dell'applicazione del prodotto.

Modalità di conservazione

Conservare in un luogo asciutto e a temperatura ambiente tra i 5°C e 25°C.

Lotto e scadenza

Lotto e scadenza sono riportati sul blister di ciascun ovulo e sul fondo della confezione esterna.

Confezione

2x5 ovuli



Agorà Pharma Srl
Piazza Duomo, 20
20122 Milano - Italia

Distribuito da Zambon Italia Srl
Via Lillo del Duca, 10
20091 Bresso, Milano - Italia

CARTA	PLASTICA
ASTUCCIO (PAP 21) FOGLIETTO (PAP 22)	BLISTER (PVC-PE)
RACCOLTA DIFFERENZIATA Verifica le disposizioni del tuo comune	

MD

REF MM002

